


# MMM Mécanique Médicale Sàrl

## PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT DU DROP (NOTAMMENT IRREGULARITES ET/OU VARIATIONS DE LA FORCE)


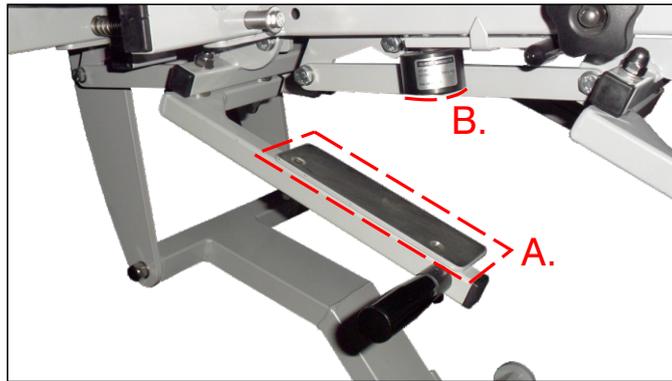


### Plaque de contact en acier.

Contrôler l'état de propreté de la surface (photo 1).

Si elle présente des traces de rouille ou d'aspérité (photo 2) la nettoyer en la frottant dans le sens longitudinal, avec le côté vert d'une éponge de ménage (photo 3 et 4).

Même procédure pour les disques de contact de l'électro-aimant (photo 5).

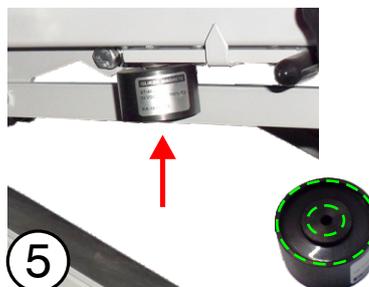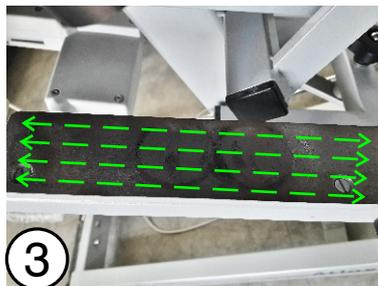

### **ATTENTION!**

Avant toute intervention, débrancher la prise d'alimentation.